

Moveo S.r.l.

Via Monsignor G. Fortin, 38
35128, Padova, Italia
+39 049 26144 27
P.I. VAT IT 05236760285
info@moveowalks.com
moveowalks.com



ExoBand-Datenblatt

BESCHREIBUNG DES MEDIZINPRODUKTS

HINWEISE

Das Medizinprodukt muss unter ärztlicher Aufsicht verordnet und angewendet werden. Der Orthopädietechniker ist die kompetente Bezugsperson sowohl für die Anwendung als auch für die Sicherheitsinformationen, und zwar entsprechend den individuellen Bedürfnissen. Um die Wirksamkeit, die Verträglichkeit und die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, muss die Anwendung mit äußerster Sorgfalt erfolgen. Jegliche Änderung des Aufbaus oder der Einstellung des Geräts muss von einem Arzt verordnet und von einem Orthopädietechniker durchgeführt werden. Bei überempfindlichen Personen kann der direkte Kontakt mit der Haut zu Rötungen oder Reizungen führen. Wenn Schmerzen, Schwellungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.



Das Medizinprodukt ist ausschließlich für die Unterstützung des menschlichen Gehens konzipiert. Von einer Verwendung in anderen Situationen (z.B. beim Autofahren, Motorradfahren, Radfahren, Schwimmen usw.) wird unbedingt abgeraten. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, haftet der Kunde.

Das Gerät besteht aus einem Gurt, zwei Beinschlaufen und zwei Spannern, die zusammen mit der Zahnführung diese Teile verbinden. Das Gerät wird in 4 austauschbaren Größen (XS, S, M, L) hergestellt.

Medizinprodukt der Klasse I.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE UND NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG DES GERÄTS

Anwendungsbereich und bestimmungsgemäße Verwendung

Das Medizinprodukt ist ausschließlich zu verwenden als:

- Gehilfe für ältere Menschen und Menschen mit Bewegungseinschränkungen aufgrund von gesundheitlichen Beeinträchtigungen und/oder Krankheiten
- Hilfe zur Verbesserung einer falschen oder pathologischen Körperhaltung.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung Es ist keine andere Verwendung als die im Abschnitt "ANWENDUNGSBEREICH UND BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG" beschriebene vorgesehen. Darüber sind folgende Verwendungen strengstens verboten:

- Verwendung des Medizinprodukts durch Personen, welche die Gebrauchsanweisung nicht gelesen haben
- Verwendung durch schwangere Frauen
- Verwendung in direktem Kontakt mit der Haut.

Für die Verwendung des Medizinprodukts durch Menschen mit schweren Erkrankungen wie Tumoren des Bewegungsapparates, neuromuskulären Erkrankungen, Wirbelsäulenerkrankungen, Leistenbrüchen usw. wird eine ärztliche Verschreibung empfohlen.

Grenzen des Medizinprodukts

- Das Medizinprodukt kann schwere Deformationen der Wirbelsäule (Dysmorphien) und andere Dysmorphien nicht behandeln (es kann deren Folgen nur verringern).
- Das Medizinprodukt kann für lange Zeit verwendet werden, d.h. bis es Anzeichen von Rissen oder Schäden aufweist, die seine Struktur, Sicherheit und Funktion beeinträchtigen würden. In diesem Fall und im Zweifelsfall empfehlen wir, sich sofort an den Verkäufer zu wenden.
- Das Medizinprodukt kann seine maximale Wirksamkeit nach einer stufenweisen Nutzung erreichen, die vom psychophysischen Zustand des Benutzers abhängt.

Waschen



Das Gerät in der Maschine im kalten Schonwaschgang waschen, nachdem die elastischen Teile wie oben beschrieben aus den Beinschlaufen entfernt wurden. Hängen Sie es zum Trocknen auf ein Trockengestell und setzen Sie es keinen Wärmequellen aus. Geben Sie es nicht in den Trockner. Verwenden Sie keinen Weichspüler und keine chemische Reinigung. Nicht bügeln.

Basis-UDI-DI: 805934045EXOBAND0003N

EMDN CODE : Y061215

EMDN BESCHREIBUNG: HÜFTORTHESEN (EINSCHLISSLICH ABDUKTIONSORTHESEN)

REF CODE : EXOBAND

GMDN CODE : 36228 (HIP ORTHOSIS)